




MANUEL D'INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT
ZEBRA S600




S600




1. Ajuster les vis de la tête d'impression

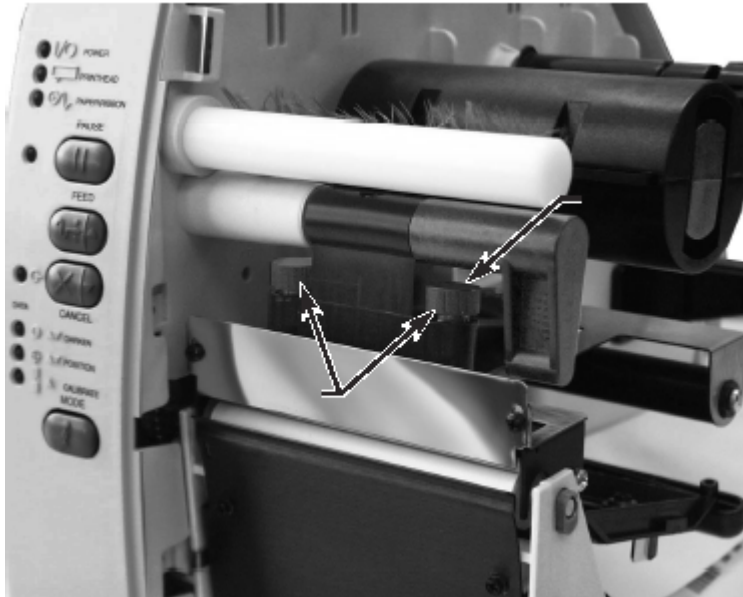

2. Mettre le détecteur (*sensor*) dans le fond complètement

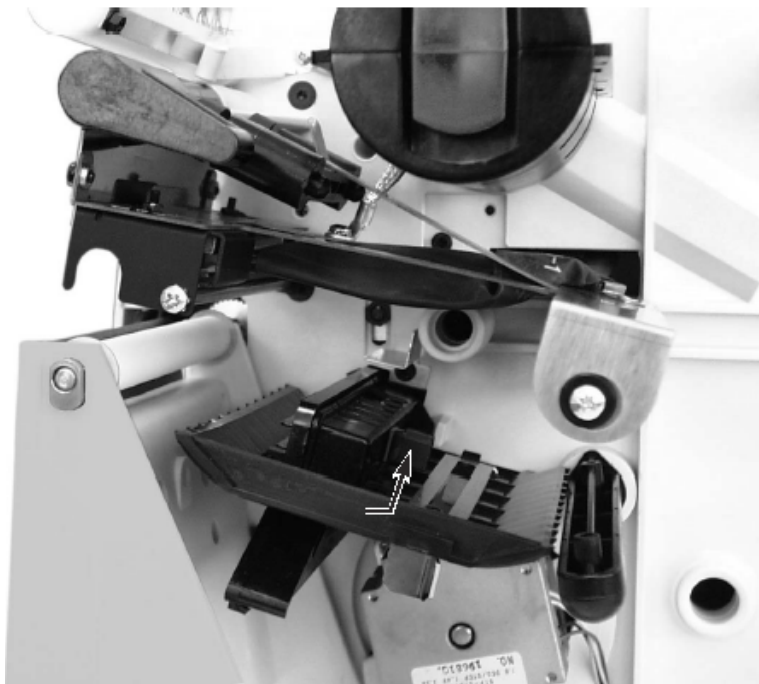

3. Pousser au fond le support à ruban d'impression pour qu'il roule facilement

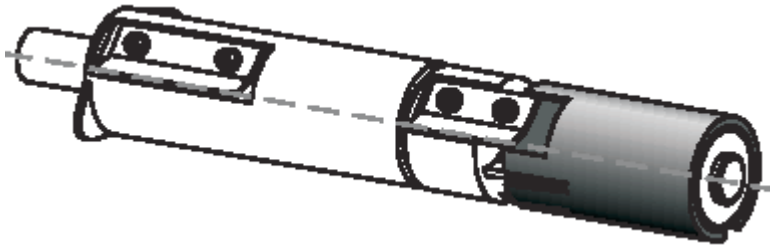

4. Installer ruban



5. Installer papier et ajuster le guide de papier



6. Réinitialiser les paramètres par défaut : appuyez et maintenez les boutons FEED et PAUSE tout en allumant l'imprimante. Conservez de façon permanente ces valeurs en mémoire en appuyant sur le bouton MODE 4 fois; les voyants lumineux DARKEN, POSITION et CALIBRATE clignotent, indiquant que les changements sont enregistrés. Pour revenir en mode d'impression, fermez et rallumez l'imprimante.
7. Mettre à ON;
8. Installer les drivers de l'imprimante;
9. Démarrez l'application ChronoMEDIC Production;
10. Sélectionnez le module <Utilitaires>, activez le bouton <Configuration> puis activez le bouton [Étiquettes] à partir de l'écran de configuration;
11. Activez le formulaire souhaité en sélectionnant le statut <Présent>;
12. Sélectionnez une imprimante locale ou sur le réseau;
13. Sélectionnez la densité de l'imprimante;
14. Activez le bouton [Réinitialiser];
15. Activez le bouton [Mise à jour];
16. Activez le bouton [Test d'impression];
17. Réglage terminé.